



Pompe à perfusion ambulatoire CADD® - Solis VIP

Mode NPT*


PROGRAMMATION NOUVEAU PATIENT




1. Pour démarrer la programmation, appuyer sur le bouton **Tâches**.



2. Avec **▼** sélectionner **Voir les tâches avancées** + **select**.

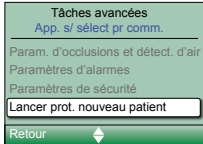


3. Avec **▼**, sélectionner **Lancer prot. nouveau patient** + **select**.

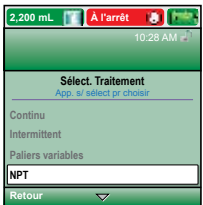

4. Entrer le code de sécurité **▼** ou **▲** Sélectionner **[Progr. manuel]** ou un protocole existant + **select**.

5. Avec **▼** ou **▲**, sélectionner **NPT** + **select**.
Sélectionner **[Progr. manuel]** ou un protocole existant + **select**.
Si protocole, sélectionner le nom de la molécule + **select**.

6. Sélectionner **Oui** pour confirmer le choix. Sélectionner **Revoir** pour voir les paramètres de la pompe.

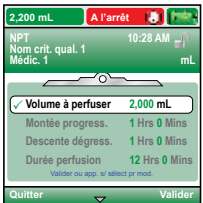

7. Ensuite, ajuster chaque paramètre de programmation.

Sélectionner un paramètre + **select** puis **▼** ou **▲** et enfin **Confirmer**.

Rappel

Volume à perfuser: volume total de liquide à perfuser

Volume résiduel: volume du réservoir (cassette ou poche)

8. Vérifier que chaque paramètre est validé. Le symbole **✓** apparaît sur la gauche + **Suivant**.

9. Retirer la pince bleue et connecter la tubulure. Suivre les instructions de la pompe jusqu'au démarrage.

10. Démarrer la pompe.

* Mode NPT: Nutrition parentérale



Changement de consommable

Même volume à perfuser, même programmation



Bouton
Marche/
Arrêt



1. Percuter la tubulure CADD® à la poche de nutrition. Sans enlever la pince bleue en place, procéder à la purge manuelle au-delà du filtre OU purger ultérieurement à l'aide de la pompe.

2. Allumer la pompe.



3. Retirer la pince bleue puis fixer le consommable à la pompe.

4. La pompe demande **Purger la tubulure?**
Sélectionner **Oui** pour purger la tubulure. Sélectionner **Non** si la tubulure a été purgée manuellement.

5. La pompe demande **Réinitialiser volume résiduel à XXmL?**
Sélectionner **Oui** pour confirmer.

6. Entrer le code de sécurité avec  ou  + **select** si besoin.

7. Démarrer la pompe.

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical ASD, Inc.
Minneapolis, MN 55442, USA
Phone : +1-614-210-7300
www.smiths-medical.com

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél : +33 (0)1 58 42 50 00
Email : france@smiths-medical.com

EC Authorized Representative
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, UK
Phone: +44 (0) 1233 722100

MPAUC-1640

smiths medical

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Veuillez vous reporter au mode d'emploi/manuel de l'opérateur pour obtenir une liste complète des indications, contre-indications, avertissements et mises en garde. CADD et le logo Smiths Medical sont des marques commerciale de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs. Les produits référencés sont marqués CE. ©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193588FR-012018