



Pompe à perfusion ambulatoire CADD[®] - Solis VIP Mode Paliers Variables


PROGRAMMATION NOUVEAU PATIENT



1. Pour démarrer la programmation, appuyer sur le bouton **Tâches**.




2. Avec **▼** sélectionner **Voir les tâches avancées** + **select**.

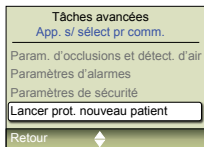

3. Avec **▼**, sélectionner **Lancer prot. nouveau patient** + **select**.

4. Entrer le code de sécurité **▼** ou **▲**+ **select**.

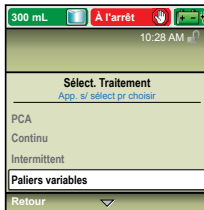

5. Avec **▼** ou **▲**, sélectionner **Continu** + **select**.
Sélectionner **[Progr. manuel]** ou un protocole existant + **select**.
Si protocole, sélectionner le nom de la molécule + **select**.

6. Sélectionner **Oui** pour confirmer le choix. Sélectionner **Revoir** pour voir les paramètres de la pompe.

Volume de perfusion: volume total de liquide à perfuser
Volume résiduel: volume du réservoir (cassette ou poche)
Incément du débit: Quantité de médicament additionnel entre 2 paliers.
Tous les paliers auront obligatoirement le même incément
Débit de plateau: Débit maximum auquel le médicament doit être perfusé



7. Ensuite, ajuster chaque paramètre de programmation. Sélectionner un paramètre + **select** puis **▼** ou **▲** et enfin **Confirmer**.

8. Vérifier que chaque paramètre est validé. Le symbole **✓** apparaît sur la gauche + **Suivant**.

9. Retirer la pince bleue et connecter la tubulure. Suivre les instructions de la pompe jusqu'au démarrage.

10. Démarrer la pompe.

Changement de consommable

Même volume à perfuser, même programmation

Bouton
Marche/
Arrêt



1. Allumer la pompe.
2. Retirer la pince bleue puis fixer le consommable à la pompe.
3. La pompe demande **Purger la tubulure?**
Sélectionner **Oui** pour purger la tubulure. Sélectionner **Non** si la tubulure a été purgée manuellement.
4. La pompe demande **Réinitialiser volume résiduel à XXmL?**
Sélectionner **Oui** pour confirmer.
5. Entrer le code de sécurité avec ou + si besoin.
6. Suivre les instructions pour purger la tubulure.
7. Démarrer la pompe.

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical ASD, Inc.
Minneapolis, MN 55442, USA
Phone : +1-614-210-7300
www.smiths-medical.com

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél: +33 (0)1 58 42 50 00
Email: france@smiths-medical.com

EC Authorized Representative
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, UK
Phone: +44 (0) 1233 722100

MPAUCA-1644

smiths medical

Find your local contact information at: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Veuillez vous reporter au mode d'emploi/manuel de l'opérateur pour obtenir une liste complète des indications, contre-indications, avertissements et mises en garde. CADD et le logo Smiths Medical sont des marques commerciale de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs. Les produits référencés sont marqués CE.
©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193592FR-012018