


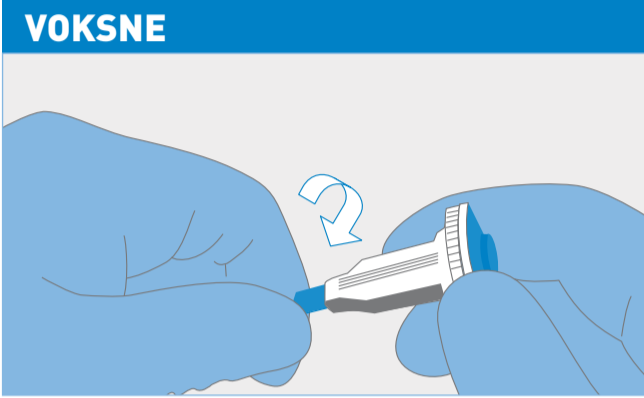
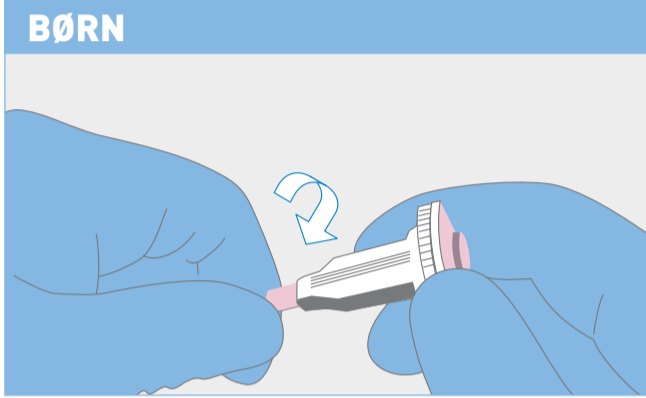
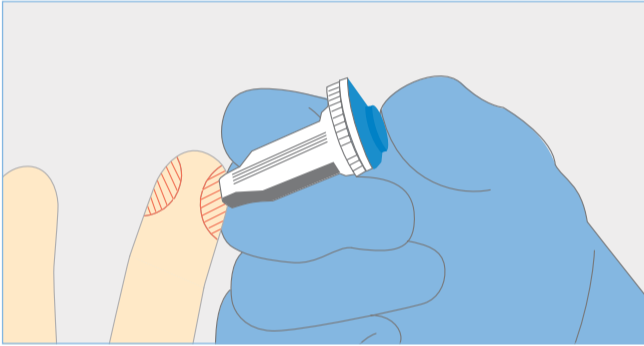


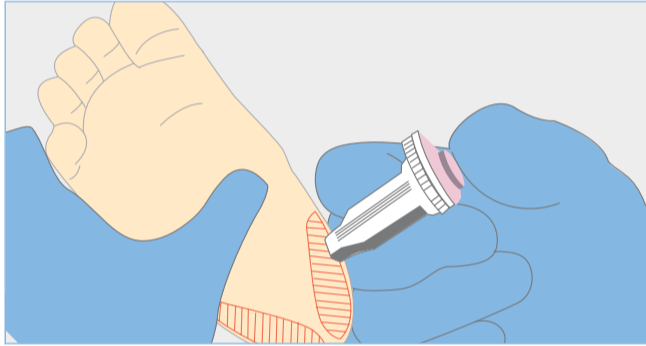

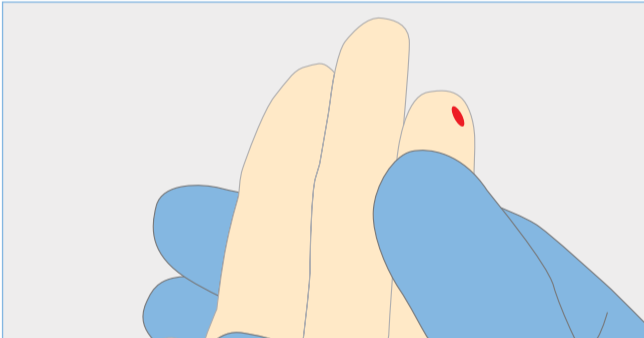

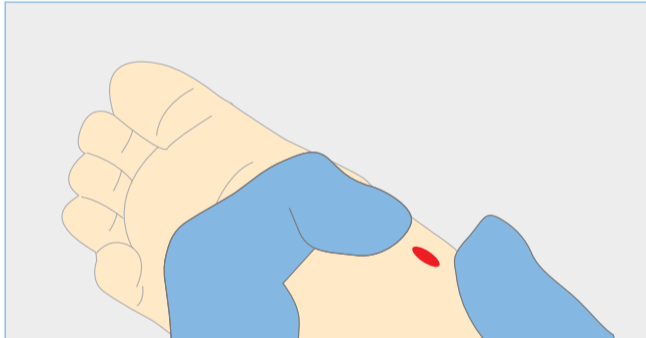

## Safe-T-Lance® Plus sikkerhedslancetter - trykknappaktiverede

### Kort instruktion

 <p><b>VOKSNE</b></p>	<p><b>1</b></p> <p>Vrid beskytteshætten løs, og træk den derefter lige af.</p>	 <p><b>BØRN</b></p>
	<p><b>2</b></p> <p>Placer Safe-T-Lance® Plus mod punkturstedet og aktiver enheden ved at anvende trykknappen</p>	
	<p><b>3</b></p> <p>Tryk forsigtigt gentagne gange tæt ved punkturstedet for at udtage den ønskede mængde blod.</p>	

**MÅ KUN BRUGES TIL AT TAGE KAPILLÆRBLODPRØVER**

Pakningsstørrelser: 200 enheder/æske, 2000 enheder/kasse

VOKSNE				BØRN	
					
Højt flow 1008-1	Normalt flow 1014-1	Lavt flow 1020-1	Mikroflow 1025-1	Pædiatrisk 1028-1	Maks. flow 1005-1
18 G kanyle	21 G kanyle	25 G kanyle	28 G kanyle	Bladbredde 1,5 mm	Bladbredde 1,5 mm
Dybde 1,8 mm	Dybde 1,8 mm	Dybde 1,4 mm	Dybde 1,6 mm	Dybde 1,2 mm	Dybde 1,6 mm

**ADVARSEL:** Må ikke anvendes, hvis beskytteshætten har været fjernet fra lancetten. Huden skal renses i overensstemmelse med lokale sikkerhedsregler. Brugte lancetter skal bortskaffes i en kanyleboks i henhold til gældende lovgivning og lokale retningslinjer.

For yderligere information, se venligst [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

DET ELLER DE BESKREVNE PRODUKTER ER MULIGVIS IKKE GODKENDT TIL ELLER TILGÆNGELIGE TIL SALG I CANADA OG ANDRE LANDE

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
Keene, NH 03431, USA  
Phone: 1-603-352-3812

**Smiths Medical International**  
1500 Eureka Park, Lower Pemberton  
Ashford Kent, TN25 4BF  
Tel: +44 (0)845 850 0445  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Fremstillet af:**  
**HTL-STREFA S.A.**  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków POLAND

**Autoriseret repræsentant i EU**  
Smiths Medical International Ltd.  
TN25 4BF, UK  
Tel: +44 (0) 1233 722100

MKEECA-0115



0344

smiths medical

Lokale kontaktoplysninger findes på: [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical er en del af den globale teknologivirksomhed Smiths Group plc. Se brugsanvisningen for at få en komplet liste over advarsler og forsigtighedsregler.

Smiths Medical er varemærker, der tilhører Smiths Medical. Safe-T-Lance er et registreret varemærke, der tilhører HTL-STREFA S.A. ©2017 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. SS195212DA-012017