

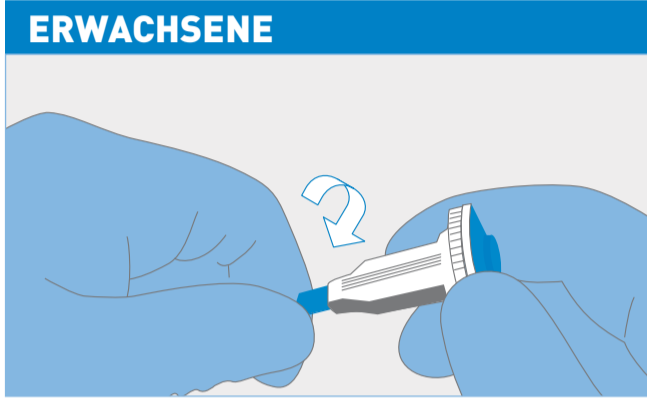
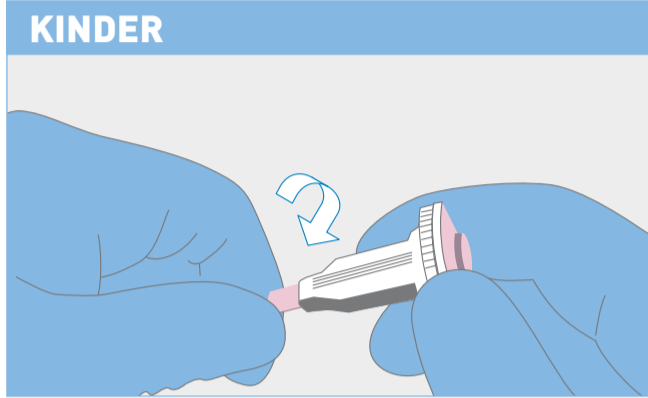
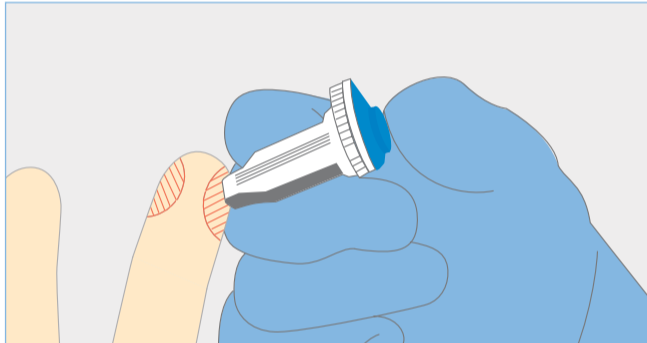
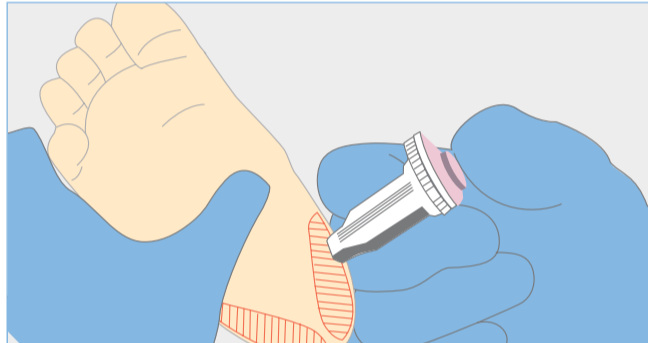


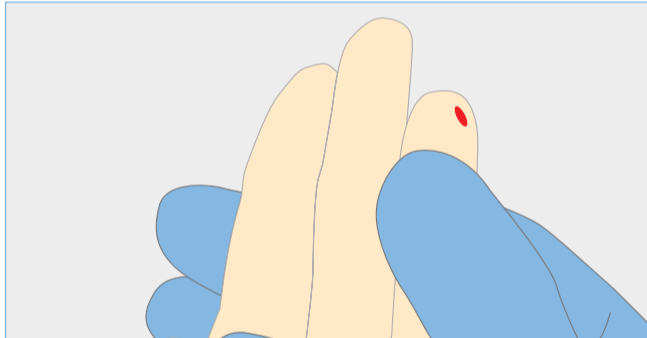

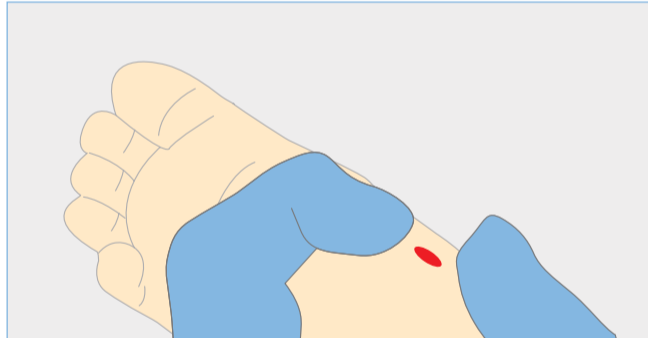


## Safe-T-Lance® Plus Sicherheitslanzette - Knopfaktivierung

### Kurzanleitung

 <p><b>ERWACHSENE</b></p>	<p><b>1</b></p> <p>Drehen Sie die Schutzkappe ab und ziehen Sie sie gerade heraus.</p>	 <p><b>KINDER</b></p>
	<p><b>2</b></p> <p>Drücken Sie das Gehäuse der Safe-T-Lance® Plus Lanzette auf die Punktionsstelle und drücken Sie zum Aktivieren den Knopf an der Oberseite der Lanzette.</p>	
	<p><b>3</b></p> <p>Drücken Sie vorsichtig in der Nähe der Punktionsstelle, um das erforderliche Blutvolumen zu erhalten.</p>	

**NUR ZUR ENTNAHME VON KAPILLARBLUTPROBEN VERWENDEN** Bestellmenge: 200 Stück/Verpackungseinheit ; 2000 Stück/Karton

ERWACHSENE				KINDER	
					
Hoher Fluss 1008-1	Hoher Fluss 1014-1	Niedriger Fluss 1020-1	Mikrofluss 1025-1	Pädiatrie 1028-1	Maximaler Fluss 1005-1
18G Nadel	21G Nadel	25G Nadel	28G Nadel	1.5mm Klinge	1.5mm Klinge
1.8mm Tiefe	1.8mm Tiefe	1.4mm Tiefe	1.6mm Tiefe	1.2mm Tiefe	1.6mm Tiefe

**WARNHINWEIS:** Nicht verwenden, wenn die Schutzkappe bereits von der Lanzette entfernt wurde. Reinigen Sie die Haut gemäß den bei Ihnen gültigen Sicherheitsverfahren. Entsorgen Sie gebrauchte Lanzetten in einem stichfesten Sicherheitsbehälter gemäß den Richtlinien der Einrichtung oder den gesetzlichen Bestimmungen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(I)E IST/SIND MÖGLICHERWEISE IN KANADA UND ANDEREN LÄNDERN NICHT LIZENZIERT BZW. ERHÄLTICH.

MKEECA-0134



0344

smiths medical

**Smiths Medical ASD, Inc.**  
Keene, NH 03431, USA  
Phone: 1-603-352-3812

**Smiths Medical Deutschland GmbH**  
Bretonischer Ring 3  
85630 Grasbrunn  
Tel: +49 89 242959-0

**Smiths Medical Österreich GmbH**  
Campus 21, Europaring A 03 5 02  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel: +43 1 890 6444-0

**Smiths Medical Schweiz AG**  
Zurichstrasse 33, 8134 Adliswil  
Telefon: +41 43 388 62 00  
Telefax: +41 43 430 24 57

**Hergestellt durch:**  
**HTL-STREFA S.A.**  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków POLAND

**EC Authorized Representative**  
Smiths Medical International Ltd.  
TN25 4BF, UK  
Tel: +44 (0) 1233 722100

Find your local contact information at: [www.smiths-medical.com/customer-support](http://www.smiths-medical.com/customer-support)

Smiths Medical ist Teil des weltweit operierenden Technologieunternehmens Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Das Markenzeichen von Smiths Medical ist eine Marke von Smiths Medical. Safe-T-Lance ist eine eingetragene Marke von HTL-STREFA S.A., Verwendung mit Genehmigung. © 2017 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. SS195212DE-022017