


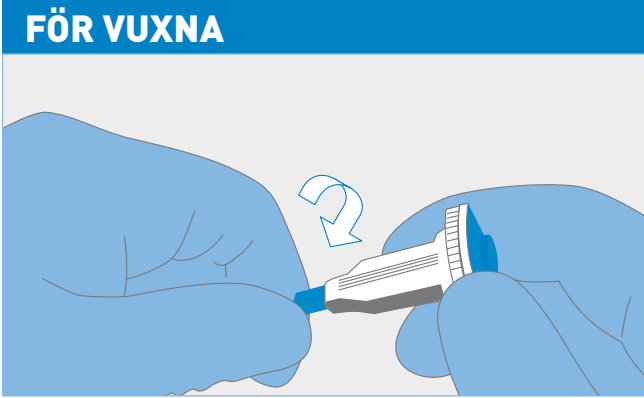
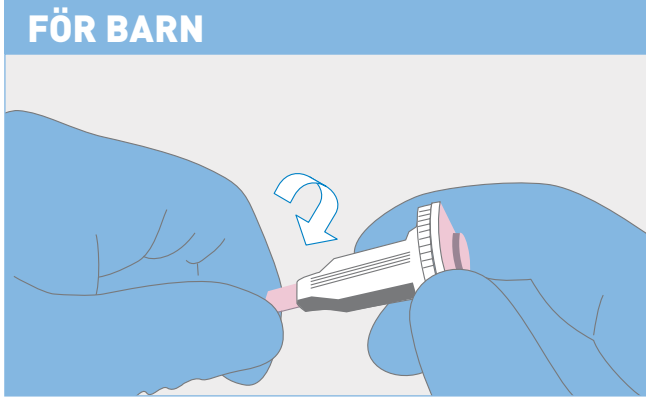
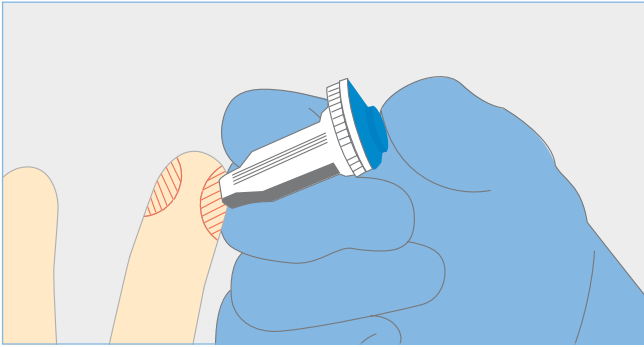


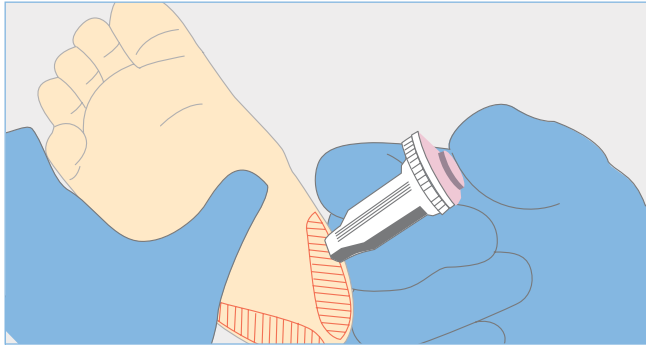

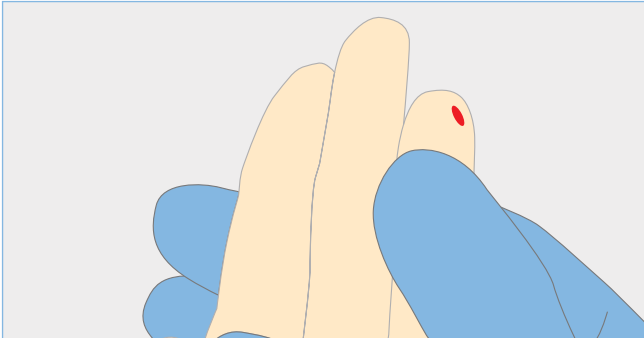

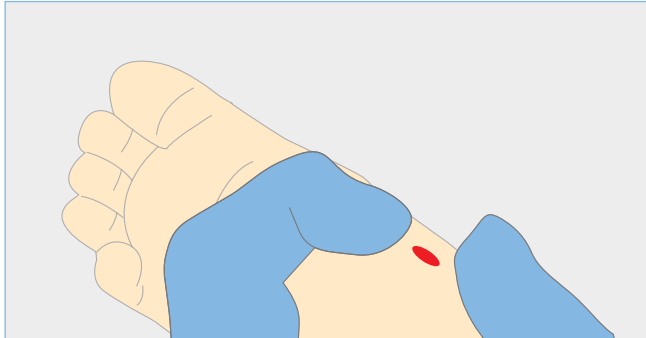

Safe-T-Lance® Plus säkerhetslansetter - tryckknappsaktiverade

Kort Bruksanvisning

 <p>FÖR VUXNA</p>	<p>1</p> <p>Vrid av skyddslocket och dra det rakt ut.</p>	 <p>FÖR BARN</p>
	<p>2</p> <p>Aktivera enheten genom att trycka Safe-T-Lance Plus®-lansettens skyddshölje ordentligt mot punktionsstället.</p>	
	<p>3</p> <p>Kläm försiktigt flera gånger nära punktionsstället för att få fram nödvändig blodvolym.</p>	

FÅR ENDAST ANVÄNDAS FÖR KAPILLÄR PROVTAGNING

Beställningsantal: 200 enheter/kartong, 2000 enheter/förpackning

FÖR VUXNA				FÖR BARN	
					
Högt flöde 1008-1	Normalt flöde 1014-1	Lågt flöde 1020-1	Mikroflöde 1025-1	För barn 1028-1	Maximalt flöde 1005-1
18G-nål	21G-nål	25G-nål	28G-nål	1.5mm bladbredd	1.5mm bladbredd
1.8mm stickdjup	1.8mm stickdjup	1.4mm stickdjup	1.6mm stickdjup	1.2mm stickdjup	1.6mm stickdjup

WARNING! Får inte användas om skyddslocket redan har avlägsnats från lansetten. Rengör huden enligt gällande säkerhetsrutiner. Kassera den använda lansetten i en behållare för stickande/skärande avfall i enlighet med vårdinrättningens riktlinjer samt nationella och statliga regleringar.

Om du vill ha mer information kan du besöka vår webbplats: www.smiths-medical.com

PRODUKTERNA SOM BESKRIVS KANSKE INTE LICENSIERAS ELLER SÄLJS I KANADA OCH ANDRA LÄNDER

Smiths Medical ASD, Inc.
Keene, NH 03431, USA
Phone: 1-603-352-3812

Smiths Medical Sverige AB
Box 1143, 164 22 Kista, SVERIGE
Tel: 08-594 772 50
Fax: 08-594 772 69
www.smiths-medical.com

Tillverkas av:
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków POLAND

Auktoriserad representant i EU
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, UK
Tel: +44 (0) 1233 722100

MKEECA-0115



smiths medical

Du hittar lokala kontaktuppgifter på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical är en del av den globala teknikverksamheten Smiths Group plc. I bruksanvisningen finns en fullständig lista över varningar och försiktighetsåtgärder. Smiths Medical är ett varumärke som tillhör Smiths Medical. Safe-T-Lance är ett registrerat varumärke som tillhör HTL-STREFA S.A. ©2017 Smiths Medical. Med ensamrätt. SS195212SV-032017