


**smiths medical**

bringing technology to life



**Lancette de sécurité  
Safe-T-Lance® Plus  
- Activation par  
bouton-poussoir**

Sûre. Confortable. Efficace.

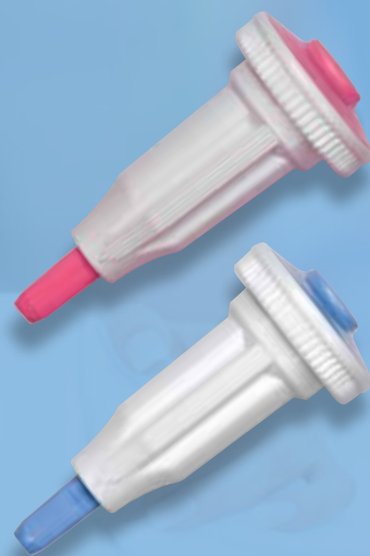

## 3 ÉTAPES SIMPLES



**1.** Dévisser le capuchon protecteur, puis le retirer.



**2.** Positionner fermement le corps de la lancette de sécurité Safe-T-Lance® Plus sur le site de prélèvement et appuyer sur le bouton-poussoir pour activer le dispositif.



**3.** Presser doucement et par intermittence à proximité du site de prélèvement pour obtenir le volume de sang requis.

*AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser si le capuchon protecteur a été précédemment retiré de la lancette. Nettoyer la peau conformément aux procédures de sécurité. Jeter la lancette usagée dans un collecteur pour objets tranchants conformément aux directives de l'établissement et aux réglementations nationales et régionales.*

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

### SÉCURITÉ


- À usage unique
- L'aiguille se rétracte et se verrouille automatiquement
- Prévention des blessures par piqûre d'aiguille et des infections croisées

### EFFICACITÉ

- Large gamme de produits - disponible en 6 tailles différentes
- Quantité de sang prélevée adaptée aux différents tests capillaires

### CONFORT

- Facile à utiliser, en seulement trois étapes
- Conçue pour contrôler la profondeur de l'aiguille
- Action à double ressort
- Aiguilles revêtues de silicone
- Prise ergonomique pour une manipulation précise

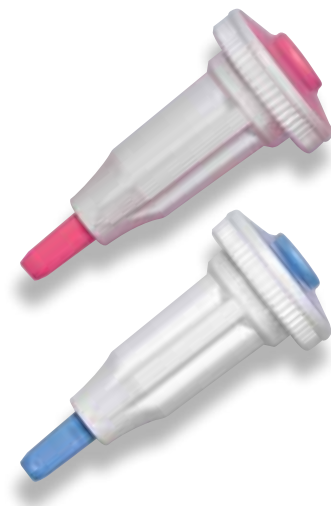

### Lancette Safe-T-Lance® Plus



Pédiatrique 1.5mm 1.2mm  
1028-1      Lame      de profondeur



Débit normal 21G 1.8mm  
1014-1      Aiguille      de profondeur



Débit max 1.5mm 1.6mm  
1005-1      Lame      de profondeur



Faible débit 25G 1.4mm  
1020-1      Aiguille      de profondeur



Débit élevé 18G 1.8mm  
1008-1      Aiguille      de profondeur



Micro débit 28G 1.6mm  
1025-1      Aiguille      de profondeur

Conditionnement : 200 unités/boîte, 2000 unités/carton

Pour plus d'informations, visiter notre site web [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

#### Distribué par:

Smiths Medical ASD, Inc.  
Keene, NH 03431, USA  
Tél: +1-603-352-3812  
Appel gratuit aux États-Unis : 1-800-258-5361

#### Smiths Medical Belgium S.A.

Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
Tél: +32 (0)2 704 49 00  
E-mail: [belgium@smiths-medical.com](mailto:belgium@smiths-medical.com)

#### Fabriqué par:

HTL-STREFA S.A.  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków POLAND

MKEECA-0094

CE 0473 Rx ONLY

smiths medical

Smiths Medical fait partie du groupe mondial de haute technologie Smiths Group plc. Consulter le mode d'emploi/manuel de l'opérateur pour obtenir la liste complète des indications, contre-indications, avertissements et précautions d'emploi. Jelco et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Safe-T-Lance est une marque déposée de HTL-STREFA S.A., utilisée sous autorisation. ©2016 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195429FRBE-122016